



Kit à monter (échantillon de tissu perforé avec 2 élastiques)

Vendu par kits de 50 Exemplaires à Usage Unique

Composition

Tissu Non Tissé 100% Polyester monocouche OekoTex 100

Poids tissu: 80 g/m²

Dimensions: 18 x 18 cm

Performances: Certification UNS-1

Masque individuel à usage des professionnels en contact avec le public

Protocole d'essais décrit dans le document DGA du 10 avril 2020 RP/20-2268/DGA
MNRBC/2000305/NP Version 1

- **Efficacité de filtration des particules de 3 µm : 100 %**
- **Respirabilité : essai de perméabilité à l'air 1040 L.m²/S pour une dépression de 100 Pa**

Stockage

Masque non utilisés à stocker dans un endroit propre, sec et à l'abri de la lumière.

Recommandations d'utilisation

- Lavez vos mains avant et après utilisation à l'eau et au savon ou avec une solution hydro-alcoolique.
- Sur espace désinfecté, poser sur le côté le plus mat. Procédez au laçage. Le côté le plus brillant est face à vous, prêt à être posé sur le visage.
- Faites un nœud de manière à adapter l'élastique à la taille de votre visage.
- Placez le masque sur le nez et la bouche en incluant le menton et passez les lacets autour des oreilles (sens de pose: le côté le plus brillant sur la peau!).
- Après usage; jetez dans un sac hermétique.

Le port du masque est limité à 4 heures.